

Anhang 5: Merkblatt Anwendung von Schutzmasken

Handhabung der chirurgischen Einweg-Gesichtsmasken

Maske (mit dem verstärkten Teil nach oben) über Nase und Mund legen.
Verstärkten Rand mit Daumen und Zeigefinger an die Nasenrücken-Kontur anpassen.



Gummibänder links und rechts hinter die Ohren legen.



Unteren Teil der Maske unter das Kinn bringen.



Maskenrand muss überall eng an die Haut anschliessen und das Gesicht vom Nasenrücken bis unterhalb des Kinns bedecken.

Nach Gebrauch Gummibänder fassen und Maske vorsichtig vom Gesicht entfernen und direkt in entsprechende Behältnisse entsorgen. Weitere Entsorgung gemäss betrieblichem Pandemieplan. Danach die Hände gründlich reinigen.